



medi

# protect. Ankle lace up

Funktionelle Sprunggelenkorthese  
Functional ankle brace  
Orthèse de cheville  
Órtesis funcional de tobillo

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi.  
Instrucciones de uso. Instruções para aplicação. Gebruiksaanwijzing.  
Brugsvejledning. Bruksanvisning. Uputa za uporabu. Инструкція по  
использованию. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Uputstvo za  
upotrebu. Інструкція з використання. Navodila za uporabo. Istruções de  
utilizare.

medi. I feel better.



1



3



2



4

# protect.Ankle lace up

---

## Назначение

protect.Ankle lace up представляет собой ортез голеностопного сустава. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения голеностопного сустава; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

---

## Показания

- Консервативное или послеоперационное лечение повреждений связок голеностопного сустава
- Лечение растяжений
- Лечение хронической нестабильности голеностопного сустава

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

## Рекомендации по надеванию

- Распустите шнуровки.
  - Согните верхний конец «язычка» над шнуровкой (это позволит Вам удобнее удерживать его при натягивании изделия).
  - Возьмите изделие за заднюю пластину и за согнутый «язычок», натяните изделие на стопу как носок.
  - Если Вам трудно натягивать ортез, то надевайте его, захватив боковые отделы – это позволит Вам тянуть с большей силой.
  - Проверьте, чтобы ортез хорошо облегал область сустава, при этом лодыжки должны располагаться в углублениях, имеющих в боковых ребрах жесткости.
  - Затяните шнуровки, начиная с области пальцев стопы.
  - Изделие можно приспособить под Ваши индивидуальные потребности с помощью удаления или установки ребер жесткости.
- 

## Рекомендации по уходу

Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
  - Не отбеливать.
  - Сушите на воздухе.
  - Не гладьте.
  - Не подвергать химической чистке.
- 



## Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

**Материалы**

полиэстер, ПУ

**Гарантия**

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

**Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.